

## הוראות שימוש בבקבוק 500 מ"ל לשטיפת עיניים

**יעוד:** שטיפת עין לאחר פגיעת כימיקל מסוכן

**תכולה:** 500 מ"ל דיפוטריין.

**אורך חיי מדף:** שנתיים.

**המלצות למיקום:** תחנות עבודה, מעבדות, רכבי הצלה

### הוראות שימוש:

1. הסר את מכסה הבקבוק ע"י סיבוב.
2. קרב את פיית המיכל אל העין.
3. שטוף בכל תכולת הבקבוק.
4. פנה לגורם רפואי מוסמך!

**יעילות מירבית תוך דקה מזמן הפגיעה!**

